

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ЛАМПА ОТБЕЛИВАНИЯ ZOOM



Официальный дистрибьютор ООО «Новгодент»

www.novgodent.ru

Содержание

<i>1. Безопасность</i>	3
<i>2. Особенности изделия</i>	4
<i>3. Спецификация</i>	4
<i>4. Состав</i>	5
<i>5. Работа</i>	5

Безопасность

Обратите внимание

Перед установкой и использованием изделия обязательно прочитайте данное руководство. Корректная работа изделия напрямую зависит от сознательности оператора и степени ознакомления с рекомендациями и инструкциями данного руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не направляйте включенное изделие напрямую в незащищенную десенную полость или на кожу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя использовать данное изделие при работе с пациентами с повышенной фоточувствительностью или с теми, кто принимает фотосенсибилизирующие средства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя использовать изделие в присутствии воспламеняющихся веществ или закиси азота.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не смотрите на свет излучаемый изделием во время использования или вы можете повредить свои глаза. Обязательно используйте специальные очки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Угол поворота во время использования не должен превышать 90° или легко можно повредить изгиб, что приведет к шуму в будущем.


Особенности изделия

- Высокоэффективный дизайн трубки позволяет использовать изделие под удобным углом.
- Комбинация трех высокоэффективных голубых светодиодов на керамическом основании.
- Таймер заранее заданного времени позволяет настраивать время отбеливания.
- Цифровой указатель со звуковыми сигналами.
- Умный авто-подбор напряжение: 100 – 240 Вольт, 50/60 Гц.
- Высокоскоростная многоарочная система отбеливания зубов.
- Основание маленького размера удобное для использования.
- Высокий уровень равномерного распределения излучения.
- Управление при помощи пульта управления.

Характеристики изделия

- Широкий спектр: 420-500 нм.
- Мощность светоотдачи: до 1800 милливатт/см³
- 100/240В, 50/60 Гц
- Вес: 1,51 кг.
- Макс. рабочий радиус: 50 см.
- Высокая однородность светоотдачи:

Дистанция между зубами и лампой (мм)	Однородность (От точки 1 до точки 5)
10 м/м	Выше 95%
20 м/м	Выше 90%
30 м/м	Выше 85%
40 м/м	Выше 80%
50 м/м	Выше 75%

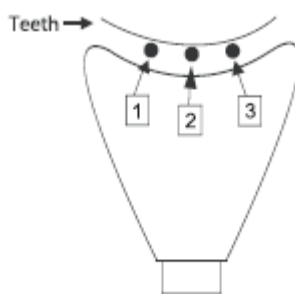


Состав

Камера	1 шт.
Адаптер	1 шт.
Очки	2 пары
Футляр	10 шт.
Роторасширитель	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Работа

Подсоедините изделие к зарядному устройству:

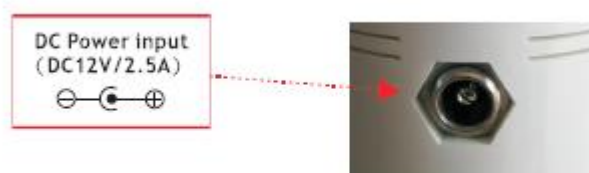


Работа с зарядным устройством:

- а) кнопка START/STOP – для включения, выключения питания.
- б) кнопка PAUSE– для остановки времени работы и светоотдачи, оставшееся время работы будет показано на индикаторе времени.
- в) Кнопки UP/DOWN – для установки времени отбеливания во время паузы: добавить/отнять 1 минуту, диапазон от 5 до 30 минут.



Работа с пультом управления:

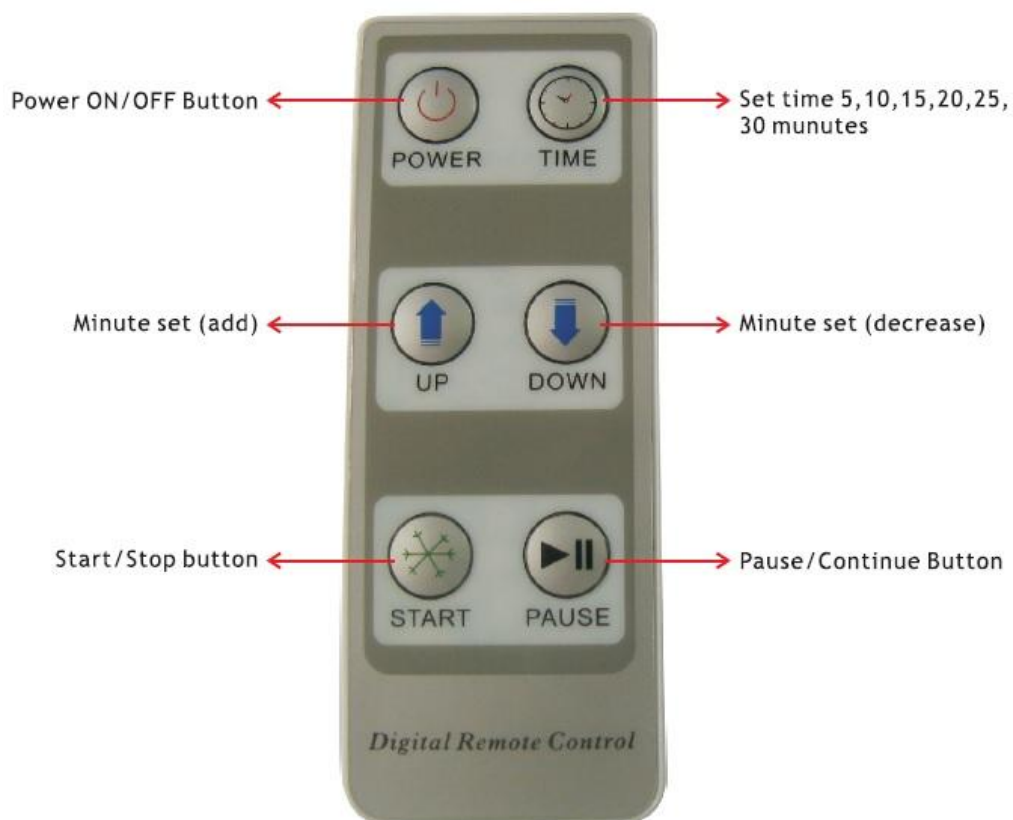

POWER – вкл/выкл

TIME – установка времени на 5,10,15,20,25,30 минут

UP – добавить минуту

DOWN – отнять минуту

START – старт/стоп

PAUSE – пауза/продолжить

Примечание: пульт работает на дистанции не более 5 метров, угол наклона 45 градусов.